

# Big Spray® New

CE 0482

polialkoholni dezinficijens brzog djelovanja za medicinske proizvode i druge površine  
gotov za uporabu / ready for use

KONTAKTNO VRIJEME ZA BAKTERIJE, UKLJ. M. tb.,  
GLJIVE I OVIJENE VIRUSE: 1 MIN  
DVA ALKOHOLA, FILM POLIHEKSANIDA

BEZ ALDEHIDA!



INAKTIVIRA  
KORONAVIRUS i sve ostale  
ovijene viruse /HBV, HCV, HIV, vakcinija;  
sve viruse influence, uklj. virus ptičje  
i svinjske gripe/ te neovijene viruse/  
rota, noro, adeno/.

- INDIKACIJE**
- medicinski proizvod CE 0482: brza dezinfekcija površina, opreme i pribora, fiksnog i mobilnog inventara, uređaja i predmeta, obuće, odjeće, jastuka, uložaka za krevete i sl.
  - biocid: za dezinfekciju radnih površina u dječjim vrtićima, domovima za starije i ne-moćne, kuhinjama, prehrambenoj industriji, sanitarnom čvoru i sl.

- SASTAV**
- 100 g otopine sadržava: 25.92 g etanola, 35.00 g izopropanola, 0.054 g poliheksanida

#### OSNOVNE ZNAČAJKE I DJELOTVORNOST

- širok antimikrobni spektar: baktericid, mikobaktericid, uklj. M.tb., fungicid, limitirani virucid; djeluje i kod 100%-tnog organskog opterećenja
- idealan za **HITNU I INTERVENTNU DEZINFEKCIJU** u prostorima visokog rizika, npr. OP salama i intenzivnoj njezi, laboratorijima, hemodijalizi, transfuziji, sobama za izolaciju, te u javnom zdravstvu, ambulantom, stomatologiji i dr.
- sinergističko djelovanje dva alkohola /izopropanol, etanol/, film poliheksanida
- testiran prema EU i HRN standardima; upotrebljava se prskanjem ili prebrisavanjem
- NOVO: prikladan za korištenje u dispnerskom sustavu A° impregnacijske (suhe) maramice

Upotrebljavajte biocide sa sigurnošću. Prije uporabe uvijek pročitajte uputu za uporabu na naljepnici i informaciju o proizvodu. Naši su proizvodi proizvedeni u skladu sa certificiranim sustavom osiguranja kvalitete ISO 9001 i EN ISO 13485 i GMP firme ANTISEPTICA Dr. Hans-Joachim Molitor GmbH, provjereni putem neovisne institucije VAH **testiran prema kriterijima EN standarda**, sukladno Direktivi za medicinske proizvode MDD 93/42 EC CE 0482 te svim ostalim aktualnim zakonima, direktivama i normama EU

**Ekskluzivno zastupstvo, uvoznik i distributer: ANTISEPTICA d.o.o.** Magdalenićeva 1, 10410 Velika Gorica  
**T** +385 1 6214 790 **F** +385 1 6226 952 **E** info@antiseptica.hr **I** www.antiseptica.hr



**ANTISEPTICA**

# Big Spray® New

CE 0482

**polialkoholni dezinficijens brzog djelovanja za medicinske proizvode i druge površine  
gotov za uporabu / ready for use**

KONTAKTNO VRIJEME ZA BAKTERIJE, UKLJ. *M. tb.*,  
GLJIVE I OVIJENE VIRUSE: 1 MIN  
DVA ALKOHOLA, FILM POLIHEKSANIDA

**BEZ ALDEHIDA!**

**SVOJSTVA I DJELOVANJE:** bistra bezbojna tekućina, bez aldehida; polialkoholni dezinficijens brzog djelovanja za medicinske proizvode i druge površine, iznimno kratkog kontaktnog vremena; baktericid, tuberkulocid, fungicid, limitirani virucid:

baktericid, fungicid EN 13697/ DGHM, OGHMP /	1 min
mikobaktericid, uklj. <i>M. tb.</i> / DGHM, OGHMP /	1 min
virucid na sve ovijene viruse: koronavirus, svi virusi influence (uklj. ptičju i svinjsku gripu), HBV/HCV/HIV, vakcinija	1 min
virucid na neovijene viruse: MNV norovirus i FCV rota virus prema EN 14476, adenovirus	1 min
prehrambena industrija A 10 °C/ 20 °C/ DVG Lista/	30 min

Poliheksanidi ostavljaju film na površini, koji prolongirano štiti od kontaminacije i kad alkoholi ishlape.

**SASTAV:** 100 g otopine sadržava: 25.92 g etanola, 35.00 g izopropanola, 0.054 g poliheksanida

**INDIKACIJE I NAČIN UPORABE:** brza dezinfekcija površina medicinskih proizvoda, te ostale opreme i pribora u medicinskoj praksi, fiksno i mobilno inventara i predmeta, obuće, odjeće, jastuka, uložaka za krevete i sl.; idealan za hitnu i interventnu dezinfekciju malih površina; upotrebljava se nerazrijeđen raspršivanjem pomoću automatskog spray-a ili prebrisavanjem, tako da tijekom propisanog kontaktnog vremena nakon nanošenja Big Spraya površina bude potpuno mokra / oko 50 ml/m<sup>2</sup>; nakon toga se ostavi osušiti. Samo za vanjsku uporabu!

**KONTRAINDIKACIJE:** preosjetljivost na alkohole

**MJESTO PRIMJENE:** brza primjena u prostorima visokog rizika, npr. OP salama, jedinicama intenzivnog liječenja, u transfuziji, hemodijalizi, izolacijama, laboratorijima, ambulancama svih medicinskih praksi, stomatologiji, dječjim vrtićima, kuhinjama, domovima za starije i nemoćne, prehrambenoj industriji i sl.

**NAČIN ČUVANJA:** Čuvajte pri temperaturi od 25 °C, podalje od dohvata djece. Treba izbjegavati ispuštanje neiskorištenog proizvoda u okoliš i površinske vode ili septičke sustave. Plamište prema DIN 51755: 21,5 °C.

**OPREMA:** 10 x 1 L, 2 x 5 L

**DODATNA OPREMA:** automatski spray za bocu od 1 L

**REGISTRACIJA:** Broj i datum Rješenja Ministarstva zdravstva RH – upis u registar biocida: UP/I-534-04/09-05/541 od 14. 12. 2009.

**PROIZVOĐAČ:** ANTISEPTICA Dr. Hans-Joachim Molitor GmbH, D-50259 Pulheim/Brauweiler, Carl-Friedrich-Gauß-Straße 7. Made in Germany.

**Ekskluzivno zastupstvo, uvoznik i distributer:** ANTISEPTICA d.o.o. Magdalenićeva 1, 10410 Velika Gorica  
T +385 1 6214 790 F +385 1 6226 952 E info@antiseptica.hr I www.antiseptica.hr



**ANTISEPTICA**