

Dezinfekcijske maramice

CE 0482

CLEANISEPT[®] FORTE MARAMICE

Bezalkoholne maramice za brzu dezinfekciju

- Univerzalna, komforna i brza primjena, praktičan dispenser
- Djelotvornost širokog spektra za 2 min
- Za virucidnu dezinfekciju ultrazvučnih sondi za transvaginalne i abdominalne preglede



Opis proizvoda

CLEANISEPT FORTE MARAMICE su bezalkoholne maramice, gotove za uporabu za brzu virucidnu dezinfekciju i čišćenje medicinskih proizvoda i inventara.

CLEANISEPT FORTE MARAMICE štede vrijeme; primjenjuju se praktično i brzo, naročito za dezinfekciju i čišćenje ultrazvučnih sondi za transvaginalne i abdominalne preglede. Maramice ne sadrže alkohol, aldehide i fenole. Mogu se pojedinačno vaditi iz dispenseru koji se može zatvarati.

CLEANISEPT FORTE MARAMICE sadržavaju otopinu bez mirisa, ugodnu za uporabu; kompatibilne su s materijalima, djeluju brzo i učinkovito za 2 min.

Područje primjene

Sukladno Direktivi o medicinskim proizvodima (MDD): brza dezinfekcija i čišćenje na alkohol osjetljivih, neinvazivnih medicinskih proizvoda kao i ultrazvučnih sondi za transvaginalne, transrektalne i abdominalne pretrage.

Primjena

Površine treba brisati s CLEANISEPT FORTE MARAMICAMA sve dok nisu u potpunosti mokre, a zatim omogućiti da se suše tijekom cijelog preporučenog kontaktnog vremena.

Spektar djelotvornosti i kontaktno vrijeme			2 min.
Bakterije i kvasci			
baktericid, djelotvornost na kvasce/yeastical)*	VAH**/ EN 16615	s mehaničkim djelovanjem, uz visoko opterećenje	•
sporicid (<i>Cl. difficile</i>)	EN 13704		•
Virusi			
virucid	RKI/DVV	uklj. poliovirus, adenovirus, norovirus, SV40 papovavirus / poliomavirus	•
virucid**	EN 14476/prEN 16777	nisko opterećenje	•
djelotvornost na poliomavirus	test "4 polja" u uvjetima prakse / na nosaču		•

*uključuje testove faza 2 korak 1 i faza 2 korak 2 (kvantitativni suspenzijski testovi i kvantitativni testovi na nosaču)

**uvršteno na VAH listu, kolona 5 min

Opis primjene

Kod reprocesiranja ultrazvučnih sondi obvezno se treba pridržavati osnovnih higijenskih standarda (preporuča se koristiti osobnu zaštitnu opremu, ostvariti higijenski prikladnu radnu okolinu, dezinficirati ruke).

Postupak prije čišćenja: nakon uklanjanja zaštitnog pokrova obrišite sondu komercijalno dostupnim ručnikom za jednokratnu upotrebu, bez mikroba i dlačica, koji je prethodno namočen u vodu.

Ručnik prostrite preko dlana, objumite son-

du i lagano pritiskajući prebrišite sve površine sonde 5 puta na isti način. Provjerite da su sve površine sonde u potpunosti mokre. Zatim osušite sondu drugim suhim ručnikom za jednokratnu uporabu.

Ručnike bacite.

Čišćenje: izvadite jednu CLEANISEPT FORTE maramicu iz dispenseru i raširite je preko dlana otvorene ruke, objumite sondu zatvarajući ruku te prebrišite maramicom sve površine, uključujući dršku, lagano pritiskajući; ponovite postupak na isti način 5 puta. Maramicu bacite.



CLEANISEPT® FORTE MARAMICE

Bezalkoholne maramice za brzu dezinfekciju

Dezinfekcija: Izvadite drugu CLEANISEPT FORTE MARAMICU FORTE maramicu iz dispenserera i raširite je preko dlana otvorene ruke, obujmite sondu zatvarajući ruku te prebrišite maramicom sve površine, uključujući dršku, lagano pritiskajući; ponovite postupak na isti način 5 puta. Bacite maramicu.

Rok valjanosti nakon otvaranja dispenserera : 28 dana

Sastav

100 g otopine sadržava:
0,4 alkil (C12 - 16)- dimetil-amonijskog klorida
0,2 g didecil-dimetil-amonijskog klorida

Podnošljivost s materijalima

CLEANISEPT WIPES FORTE su preporučene za dezinfekciju ultrazvučnih sonda za abdominalne i transvaginalne pretrage aparata sljedećih proizvođača:

- Esaote GmbH, Köln
- Siemens Medical Solutions, Erlangen


Stručna mišljenja

Na raspolaganju za vas posjedujemo opsežne stručne izvještaje za sve naše proizvode. Na vaš zahtjev dostavit ćemo vam portfolio ekspertnih izvješća.


Oznake upozorenja i opasnosti

Vrlo toksičan za vodene organizme s dugotrajnim učinkom. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Samo za profesionalnu uporabu. Ostatke sadržaja/spremnik zbrinuti pri nadležnom lokalnom poduzeću za odlaganje otpada. Samo za profesionalnu upotrebu.


POSTUPAK PRIJE ČIŠĆENJA

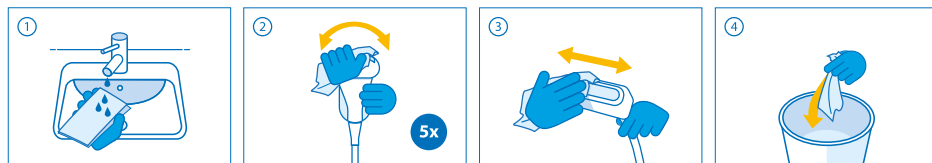

ČIŠĆENJE

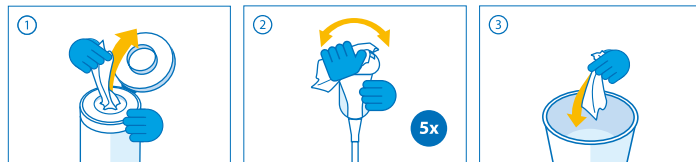


DEZINFEKCIJA

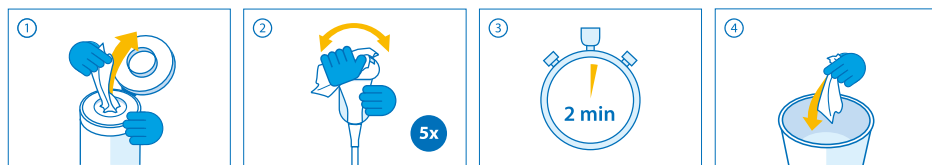

SUŠENJE



SKLADIŠTENJE

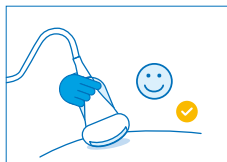

CE 0482

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Proizvod	Jed. pakiranje	Sadržaj	Transportno pakiranje	Veličina maramice	REF
CLEANISEPT FORTE MARAMICE	dispenser s poklopcem	100 kom maramica	12	14 x 20 cm	00-235-D100

Biocide koristite sa sigurnošću. Uvijek pročitajte etiketu/uputu i informacije o proizvodu prije upotrebe.

PROIZVOĐAČ:



Dr. Schumacher

Made in Germany

UVOZNIK I EKSKLUZIVNI DISTRIBUTER:



ANTISEPTICA d.o.o. Magdalenićeva 1, 10410 Velika Gorica
T +385 1 6214 790 • F+385 1 6226 952
E:info@antiseptica.hr • www.antiseptica.hr

Dr. Schumacher is certified according to DIN EN 13485, DIN EN ISO9001, DIN EN ISO14001, BS OHSAS 18011 and has a validated environment management system according to EMAS and is a member of IHO, VCI, BAH, DGSV and of the DGKH. www.schumacher-online.com

