


inovinirani koncentrirani aldehidni dezinficijens visokog stupnja za instrumente, uključujući endoskope, ostale termolabilne instrumente i pribor za anesteziju i respiratornu terapiju, s najnižom koncentracijom glutaraldehida u kategoriji, potpuni virucid, sterilant

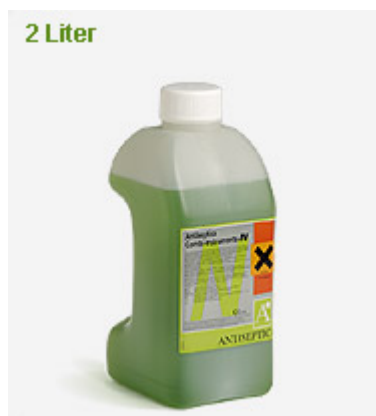

SVOJSTVA I DJELOVANJE: koncentrirana otopina, žućkaste boje, osebujna aromatičnog mirisa, sinergističkog antimikrobnog djelovanja glutaraldehida i dviju kvartenih amonijskih soli, s odličnim svojstvima čišćenja; brzo i u niskim koncentracijama inaktivira bakterije, uklj. *M.tuberculosis*, *E.hirae*, viruse* i gljive; inaktivira i spore, čime se postiže sterilizacija; ne interferira sa sapunima i proteinima, znatno manje toksičnosti od 2% glutaraldehida, veoma dobra podnošljivost materijala, atest Olympus, na listi preporučenih dezinficijenasa Karl Storz, ekološki prihvatljiv, ekonomičan; djeluje u prisutnosti organskih tvari; ne djeluje korozivno; otopina stabilna, najekonomičniji u klasi .

SASTAV: 100 g otopine sadržava: 8.0 g glutaraldehida, 5.75 g formacetala

INDIKACIJE: dezinfekcija širokog spektra i čišćenje instrumenata i pribora od metala, stakla, porcelana, gume i plastike u prostorima visokog rizika, uključujući završnu dezinfekciju termolabilnih instrumenata, npr. fleksibilnih i rigidnih endoskopa, te pribora za anesteziju i respiratornu terapiju.

KONTRAINDIKACIJE: preosjetljivost na osnovne sastojke.

NAČIN UPORABE: Combi instruments N se upotrebljava razrijeđen vodom. Radne koncentracije se pripremaju prema tablici:

Indikacije za primjenu Combi Instruments N	C. Instruments N volumen (ml):	Nadopuniti vodom do (L):	Koncentracija radne otopine (%):	Kontaktno vrijeme:
dezinfekcija visokog stupnja (HLD) za instrumente i endoskope semikritične razine, npr.gastroskope	30	1	3%* (0.24 % glutaraldehida)	5 min
dezinfekcija visokog stupnja (HLD) za instrumente i endoskope semikritične razine, npr. gastroskope	15	1	1.50%* (0.12 % glutaraldehida)	15 min
završna dezinfekcija endoskopa i pribora kritičkog stupnja (kemijska sterilizacija)**	75	1	7.5%** (0.6 % glutaraldehida)	4 sata

*BVDV (HCV), HBV,HIV, HAV, vaccinia, adeno :1% 15 min, polio.3% 30 min, *M.terrae*: 1% 30 min,1,5% 15 min.,**za sporicidnu djelotvornost i završnu dezinfekciju (kemijsku sterilizaciju) endoskopa, npr. artroskopa ili laparoscopa ili drugih termolabilnih instrumenata kritičkog stupnja; ova otopina ne smije doći u dodir s očima niti sa sluznicom; ako se to dogodi, odmah ih treba dobro isprati vodom.

Onečišćene instrumente i endoskope valja nakon uporabe očistiti od organskog onečišćenja specijalnim deterdžentom za čišćenje instrumenata (Instruton) prema uputama njihovih proizvođača. Nakon čišćenja se endoskopi (instrumenti) isperu vodovodnom vodom i urone u Combi instruments® N u posudi za dezinfekciju s poklopcem; koncentracija Combi instrumentsN ovisi o stupnju dezinfekcije ili sterilizaciji koju želimo postići; nakon propisanog vremena djelovanja endoskop se temeljito ispere destiliranom vodom ili vodovodnom vodom kvalitete vode za piće, zatim etilnim alkoholom (70%) i posuši. Nakon toga je spreman za uporabu. Ako se endoskop pohranjuje preko noći, te ako se zahtjeva kemijska sterilizacija, tj. sporicidni učinak (laparoskopiji, artroskopiji), ispire se sterilnom destiliranom vodom, a potom etilnim alkoholom (70%), zatim posuši vrućim zrakom i spremi. Ako je od zadnje dezinfekcije prošlo dulje vrijeme, prije ponovne uporabe postupak dezinfekcije treba ponoviti.

NAČIN ČUVANJA: Čuvajte pri temperaturi do 25 °C, podalje od dohvata djece. Razrijeđene otopine su stabilne 10 dana, odnosno dotle dok su potpuno bistre.

OPREMA: plastična ambalaža: 6x2 L, 2x5 L

REGISTRACIJA: Br. i datum Rješenja Agencije za lijekove i med. proizv.: UP/I°-530-09/09-05/270 od 17.7.2009.

PROIZVOĐAČ: ANTISEPTICA Pulheim, Njemačka, EU, www.antiseptica.com Proizvedeno sukladno standardima DIN EN ISO 9001/DIN EN ISO 13485, GMP kao i sukladno MDD 93/42/EWG.

Ekskluzivno zastupstvo, uvoznik i distributer: **ANTISEPTICA d.o.o.**, Magdalenićeva,1, Velika Gorica., tel. ++385 1 6214 790, fax 01 6226 952, e-mail: info@antiseptica.hr, www.antiseptica.hr



ANTISEPTICA