

Uputa za upotrebu



 **KONCENTRAT**

PRIPREMA RADNE OTOPINE

(*Prema DGHM –Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie –i EN standardima)

Koncentracija	Kontaktno vrijeme	VODA (litara)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 %	30 min	Koncentrat (ml)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
2 %	15 min		20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
3 %	5 min		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300

Napomene:

- Za pripremu radne otopine koristi se vodovodna voda sobne temperature i zatvarač za razrjeđivanje za bocu a 2L
- **Radna otopina se priprema se svaki dan svježa (promjena se vrši i ranije, ako se zamuti ili se uoči onečišćenje ili talog) !**
- Dezinfekcija se vrši prebrisavanjem, uranjanjem ili prskanjem površina!
- Potrebno je pridržavati se preporučenog kontaktnog vremena za pojedine koncentracije (kao gore).
- Koristite zaštitne rukavice! Ne miješajte s drugim proizvodima/ kemikalijama!
- Čuvajte pri sobnoj temperaturi! Ne izlagati direktnim izvorima topline.
- U slučaju izravnog kontakta s otopinom isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika.

