


Descorapid® maramice CE 0124

vlažne alkoholne maramice za brzu dezinfekciju i čišćenje površina, ruku i kože
biocidni pripravak

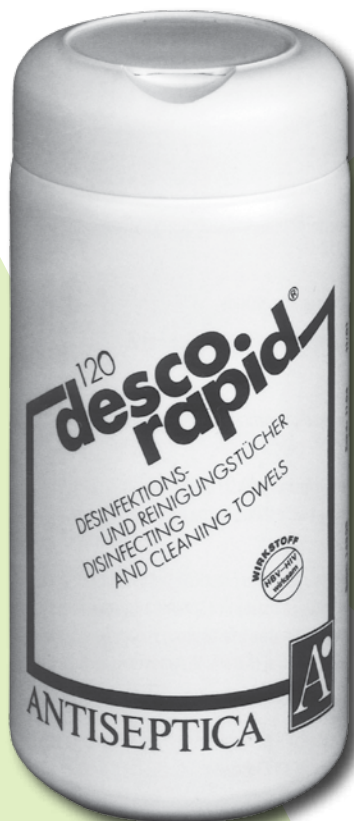

OTOPINA DJELUJE
BAKTERICIDNO (UKLJ. *M.tb.*),
FUNGICIDNO I VIRUCIDNO
NA OVJENE VIRUSE
(*HBV, HIV*) ZA 30s

INDIKACIJE

- za brzu dezinfekciju i čišćenje površina, opreme, pribora i ruku: u laboratoriju, u ambulanti, na odjelu, u intenzivnoj njezi, stomatologiji, u hitnoj pomoći, u uredu, npr. za tipkovnicu računala, za kvake i vrata; u automobilu, kod slobodnih aktivnosti; ostaviti da djeluje 30s
- za brzo čišćenje i higijensku dezinfekciju ruku: višekratno utrljavati u ruke 30 s
- za brzu dezinfekciju kože prije incizija, punkcija, davanja injekcija, cijepljenja, vađenja krvi: najmanje 15 s

SASTAV OTOPINE KOJOM SU NATOPLJENE MARAMICE

- 70% izopropanola i 0.1% butandiola

OSNOVNE ZNAČAJKE I DJELOTVORNOST OTOPINE

- sinergističko mikrobicidno djelovanje dva alkohola /izopropanol, butandiol/
- širok antimikrobni spektar: uništava bakterije, gljive, viruse /*HBV, HIV*/
- iznimno dobra podnošljivost za materijale i kožu i kod dugotrajne uporabe
- ne ostavlja tragove niti film na površinama
- ekonomično, praktično, 120 maramica u dozi, uložak

Upotrebljavajte biocide sa sigurnošću. Prije uporabe uvijek pročitajte uputu za uporabu na naljepnici i informaciju o proizvodu. Naši su proizvodi proizvedeni u skladu sa certificiranim sustavom osiguranja kvalitete ISO 9001, DIN ISO 13485 i GMP firme ANTISEPTICA GmbH, provjereni putem neovisne institucije VAH prema kriterijima EN standarda, sukladno Direktivi za medicinske proizvode MDD 93/42 EC CE 0124, te svim ostalim aktualnim zakonima, direktivama i normama EU

Ekskluzivno zastupstvo i distributer: ANTISEPTICA d.o.o. Magdalenićeva 1, 10410 Velika Gorica, HR
T +385 1 6214 790 F +385 1 6226 952 E info@antiseptica.hr | www.antiseptica.hr



ANTISEPTICA

Descorapid® maramice CE 0124

vlažne alkoholne maramice za brzu dezinfekciju i čišćenje površina, ruku i kože
biocidni pripravak

SASTAV: /aktivne tvari otopine kojom su natopljene maramice/: 70% izopropanola i 0,1% butandiola

INCI SASTAV otopine: izopropilni alkohol, voda, butilen glikol, parfem, limonen

SVOJSTVA I DJELOVANJE: maramice Descorapid su natopljene alkoholnim dezinficijensom za površine / ruke / kožu, ugodna mirisa, sastava kompatibilnog s kožom i raznim materijalima; otopina je istovjetna alkoholnom antiseptiku za ruke Manorapid rfu te posjeduje baktericidnu, fungicidnu i virucidnu djelotvornost /HBV, HIV/; ne ostavljaju tragove niti film

INDIKACIJE:

- za brzu dezinfekciju i čišćenje površina:
 - kod rada u laboratoriju, u ambulanti, na odjelu
 - u intenzivnoj njezi, OP sali, u uredu, npr. za tipkovnicu računala, za kvake i vrata; u automobilu, kod slobodnih aktivnosti
- za brzo čišćenje i dezinfekciju ruku:
 - višekratno utrljavati, ruke ostaviti vlažnima 30 sekundi
- za brzu dezinfekciju intaktne kože prije injekcija, vađenja krvi:
 - pustiti da djeluje najmanje 15 sekundi

KONTRAINDIKACIJE: preosjetljivost na alkohole; Descorapid se s oprezom primjenjuje na plastičnim materijalima koji su osjetljivi na alkohole, npr. akrilno staklo /za osjetljive površine preporučujemo Acrylan maramice/

MJESTO PRIMJENE: u svim područjima medicinskih praksi i disciplina: ambulante, laboratorij, operacijske dvorane, intenzivna njega, izolacije, dijagnostika, stomatologija, bolnički odjeli, uz krevet bolesnika, kućna njega, prva pomoć, javno zdravstvo; u uredima, u automobilima, kod slobodnih aktivnosti i sporta

NAČIN UPORABE: Otvorite manji poklopac na zatvaraču plastične doze. Povucite prema gore kraj papirnate vlažne maramice i odvojite je od role, tako da je sljedeća maramica spremna za uporabu. Površinu ili ruke prebrišite vlažnom maramicom i pustite da se osuši. Ruke i kožu trljajte višekratno maramicom i ostavite vlažnima 30 s. Ponovo zatvorite poklopac. U slučaju potrebe odvrnite gornji zatvarač na dozi i kraj maramice ponovo uvucite u prorez. Spriječiti dodir s očima.

NAČIN ČUVANJA: Čuvajte podalje od plamena i izvora topline pri temperature do 25 °C. Zapaljivo.

OPREMA: 120 vlažnih maramica u plastičnoj dozi s poklopcem; karton s 12 kutija po 120 maramica; uložak /refill/ za novo punjenje doze sa 120 vlažnih maramica; karton s 12 uložaka

PROIZVOĐAČ: ANTISEPTICA Dr. H.-J. Molitor GmbH, D-50259 Pulheim, Njemačka / EU
Proizvedeno sukladno standardu DIN EN ISO 9001. Made in Germany.

REGISTRACIJA: Rješenje o upisu u Registar biocidnih pripravaka MZ RH UP/I-543-04/12-05/166 od 30.srpnja,2012.



Ekskluzivno zastupstvo i distributer: ANTISEPTICA d.o.o. Magdalenićeva 1, 10410 Velika Gorica, HR
T +385 1 6214 790 F +385 1 6226 952 E info@antiseptica.hr | www.antiseptica.hr



ANTISEPTICA