

# Instruton® / Instruton®E CE 0124

moderni specijalni detergentski za manuelno i strojno čišćenje instrumenta i pribora, uključujući fleksibilne i rigidne endoskope



**INSTRUTON® - s polialkoholima**



**INSTRUTON®E – s enzimima**

## SASTAV:

**Instruton:** polialkoholi, specijalne površinske aktivne tvari, fosfati za medicinsku primjenu

**Instruton E:** proteaze, amilaze, specijalni tenzidi, sredstva za zaštitu od korozije

**SVOJSTVA, INDIKACIJE, MJESTO PRIMJENE:** bistre, bezbojne do slabožućkaste koncentrirane otopine, ugodnog aromatskog mirisa, za čišćenje i njegu medicinskih instrumenata, uključujući endoskope, te pribora od stakla, porculana, gume, metala ili plastike prije dezinfekcije ili sterilizacije: čiste brzo, automatski i potpuno; dobre su kompatibilnosti s materijalima i s dezinficijensima za instrumente; radna otopina je pH neutralna; Instruton E je namijenjen za strojno i manuelno čišćenje

## NAČIN UPORABE:

**Instruton:** za manuelno čišćenje; razrijedite vodom do 1% /10 ml koncentrirane otopine nadopunite vodom do 1 L/

**Instruton E:** za kemotermičko /strojno i manuelno reprocessiranje/ enzimatsko čišćenje instrumenata prije dezinfekcije; kod strojnog čišćenja instrumenata doziranje i čišćenje je regulirano automatom za čišćenje / dezinfekciju; preporučena koncentracija je 0,5-1% , a preporučena temperatura ulazne vode je 35-40 °C; kod manuelnog čišćenja Instruton E razrijedite vodom do 0,5 – 3 % /5–30 ml koncentrirane otopine nadopunite vodom do 1 L/; koncentracija ovisi o stupnju onečišćenja

Potpuno uronite instrument, odnosno pribor. Pustite da djeluje 5-30 minuta. Ako je instrument jače onečišćen organskim tvarima: /npr. osušena krv, gnoj/, potrebno je povećati koncentraciju dezinficijensa ili vrijeme ekspozicije.

**NAČIN ČUVANJA:** Čuvajte pri temperaturi do 25 °C.

**OPREMA:** 6 x 2 L , 2 x 5 L

**PROIZVOĐAČ:** ANTISEPTICA chem. pharm. Produkte GmbH, D-50259 Pulheim /Njemačka / EU; proizvedeno sukladno standardu DIN EN ISO 9001 i DIN EN 13485

**Ekskluzivno zastupstvo, uvoznik i distributer:** ANTISEPTICA d.o.o., Magdalenićeva 1, 10410 Velika Gorica  
tel.:++385 1 6214 790,fax: ++385 1 6226 952,e-mail: info@antiseptica.hr, www.antiseptica.hr  
revizija upute: žžagrovic, travanj 2011.

