

Combi instruments N[®]

Otopina za dezinfekciju i čišćenje instrumenta i pribora, uključujući endoskope i kritičku termolabilnu opremu. **potpuni virucid. sterilant**

Uputa za uporabu



PRIPREMA RADNE OTOPINE

(*Prema DGHM –Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie –i EN standardima



KONCENTRAT



Koncentracija %	Kontaktno vrijeme	voda (litara)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1%	30 min	Koncentrat (ml)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
1,5 %	15 min		15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
3 %	5 min		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300

⚠Napomene:

- Instrument naprije treba očistiti u otopini Instrutona (1 %, 5–30 min), isprati i posušiti, a zatim dezinficirati u otopini Combi instruments N 1,5% ili 3%
- Za pripremu radne otopine Combi instruments N za čišćenje i dezinfekciju koristi se vodovodna voda sobne temperature. Kvalitetu vode (vodovodna, demi-, destilirana ili sterilna destilirana) za ispiranje instrumenata nakon čišćenja /dezinfekcije određuje korisnik prema potrebi i stupnju kritičnosti instrumenta ! Instrument treba temeljito isprati nakon čišćenja/ dezinfekcije sukladno uputi za manuelno reprocesiranje.
- **Radna otopina za čišćenje endoskopa prije dezinfekcije priprema se najmanje 1x svakog dana svježa, a mijenja se i prije ako se onečisti.**
- **Radna otopina za dezinfekciju očišćenih instrumenata je aktivna do 10 dana; promjena se vrši i ranije, ako se zamuti zbog unosa organskih tvari !**
- Dezinfekcija instrumenata se vrši uranjanjem u posudi s poklopcem, a ispiranje nakon dezinfekcije obavlja se vodom kvalitete vode za piće, zatim etanolom 70%, nakon čega se posuši zrakom. Ne miješajte s drugim proizvodima/kemikalijama. Otopinu čuvajte kod 20 °C ! Ne izlagati izvorima topline.
- Za kritičku opremu (artroskopi i laparoscopi) koristi se C. instruments N 7,5% 4h, a ispiru se sterilnom vodom i etanolom (70%), zatim se posuši zrakom.
- Koristite zaštitne rukavice i odjeću, te zaštitu za oči/lice! U slučaju izravnog dodira s kožom isprati vodom i zatražiti savjet liječnika!

ANTISEPTICA

ANTISEPTICA chem.farm.products GmbH
Pulheim/Brauweiler/ Germany

Ekskl. Zastupstvo, uvoznik i distributor ANTISEPTICA d.o.o.
10410 Velika Gorica ,Magdalenićeva ,1.

