

#### Uputa za upotrebu



#### PRIPREMA RADNE OTOPINE

(\*Prema DGHM –Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie –i EN standardima



Koncentracija %	Kontaktno vrijeme	VODA (litara)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
0,5%	30 min	Koncentrat (ml)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
1 %	15 min		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
3 %	5 min		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300

#### ! Napomene:

- Za pripremu radne otopine Triacida N za čišćenje i/ili dezinfekciju koristi se vodovodna voda sobne temperature.
- Kvalitetu vode (vodovodna, demi-, destilirana ili sterilna destilirana ) za ispiranje instrumenata nakon čišćenja /dezinfekcije određuje korisnik prema potrebi i stupnju kritičnosti instrumenta !
- **Radna otopina za dekontaminaciju instrumenata prije sterilizacije ili za čišćenje endoskopa prije dezinfekcije priprema se najmanje 1x svakog dana svježa.**
- **Radna otopina za dezinfekciju očišćenih instrumenata je aktivna do 7 dana; promjena se vrši i ranije, ako se zamuti ili se na dnu posude uoči onečišćenje ili talog !**
- Dezinfekcija instrumenata se vrši uranjanjem prema protokolu proizvođača endoskopa /instrumenata! Koristite zaštitne rukavice, naočale, pregaču.
- Ne miješajte s drugim proizvodima/kemikalijama. Čuvajte pri sobnoj temperaturi! Ne izlagati izravnim izvorima topline.
- U slučaju izravnog dodira s kožom isprati vodom i zatražiti savjet liječnika!