


Instruton® / Instruton® E

suvremeni specijalni detergentski za manualno i strojno čišćenje instrumenta i pribora, uključujući fleksibilne i rigidne endoskope



NISKA koncentracija,
KRATKO kontaktno vrijeme!

Instruton® - s polialkoholima Instruton® E - s enzimima

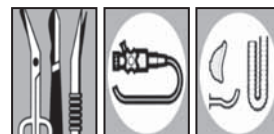

INDIKACIJE • za čišćenje i njegu medicinskih instrumenata, te pribora, uključujući endoskope

SASTAV • **Instruton:** polialkoholi, specijalne površinske aktivne tvari, fosfati za medicinsku primjenu
• **Instruton E:** enzimi, specijalni tenzidi, sredstva za zaštitu od korozije

OSNOVNE ZNAČAJKE I DJELOTVORNOST

Instruton: za manualno čišćenje

Instruton E: za strojno i manualno čišćenje

- za medicinske instrumente od stakla, porculana, gume, metala ili plastike prije dezinfekcije ili sterilizacije
- otopine čiste brzo, automatski i potpuno, čuvaju instrumente i pribor
- odlična kompatibilnost s materijalima endoskopa
- komplementarni s dezinficijensima za instrumente, uključujući endoskope
- koncentri, ugodnog aromatskog mirisa, ekonomični
- prikladni i za ultrazvučno čišćenje
- pH neutralni
- biorazgradljivi

Naši su proizvodi proizvedeni u skladu sa svim aktualnim zakonima, normama, uputama i direktivama EU, kao i sukladno certificiranom sustavu osiguranja kvalitete tvrtke ANTISEPTICA GmbH.

Ekskluzivno zastupstvo i distributer: ANTISEPTICA d.o.o. Magdalenićeva 1, 10410 Velika Gorica
T +385 1 6214 790 F +385 1 6226 952 E info@antiseptica.hr | www.antiseptica.hr



ANTISEPTICA



Quality Management
Medical Device
Directive 93/42/EEC



Quality Management
We are certified
according ISO 9001



Quality Management
We are certified
according DIN ISO 13485

Instruton® / Instruton® E

suvremeni specijalni detergentski za manuelno i strojno čišćenje instrumenta i pribora, uključujući fleksibilne i rigidne endoskope

Instruton® - s polialkoholima

Instruton® E - s enzimima

SASTAV:

Instruton: polialkoholi, specijalne površinske aktivne tvari, fosfati za medicinsku primjenu

Instruton E: razni proteolitički enzimi, amilaze, specijalni tenzidi, sredstva za zaštitu od korozije

SVOJSTVA, INDIKACIJE, MJESTO PRIMJENE: bistre, bezbojne do slabožućkaste koncentrirane otopine, ugodnog aromatskog mirisa, za čišćenje i njegu medicinskih instrumenata, uključujući endoskope, te pribora od stakla, porculana, gume, metala ili plastike prije dezinfekcije ili sterilizacije: čiste brzo, automatski i potpuno; dobre su kompatibilnosti s materijalima i s dezinficijensima za instrumente; radna otopina je pH neutralna; Instruton E je namijenjen za strojno i manuelno čišćenje

NAČIN UPORABE:

Instruton:

- za manuelno čišćenje; razrijedite vodom do 1% / 10 ml koncentrirane otopine nadopunite vodom do 1 L

Instruton E:

- za kemotermičko /strojno i manuelno reprocesiranje i enzimatsko čišćenje instrumenata prije dezinfekcije; kod strojnog čišćenja instrumenata doziranje i čišćenje je regulirano automatom za čišćenje i dezinfekciju; preporučena koncentracija je 0,5-1 % ; ako je temperature ulazne vode 35-40 °C, učinak čišćenja je veći; temperatura vode ne smije biti veća od 40 °C;
- kod manualnog čišćenja Instruton E razrijedite vodom do 0,5 – 3 % / 5–30 ml koncentrirane otopine nadopunite vodom do 1 L; koncentracija ovisi o stupnju onečišćenja; za bolju iskoristivost enzimskog deterdženta pribor i instrumente treba uvijek prije čišćenja Instrutonom E isprati običnom vodom;
- nakon ispiranja vodom, potpuno uronite instrument, odnosno pribor u radnu otopinu; pustite da djeluje najmanje 2-3 min a u slučaju da je instrument još uvijek onečišćen organskim tvarima /npr. osušena krv, gnoj/ potrebno je ponoviti postupak ili povećati koncentraciju deterdženta ili vrijeme ekspozicije s Instrutonom E produžiti do 30 min;
- otopina se može koristiti više puta na dan sve dok je bistra, ali je treba pripremiti svakog dana svježu

NAČIN ČUVANJA: Čuvajte pri temperaturi do 25 °C.

OPREMA: 6 x 2 L, 2 x 5 L

PROIZVOĐAČ: ANTISEPTICA chem. pharm. Produkte GmbH, D-50259 Pulheim /Njemačka / EU; proizvedeno sukladno standardu ISO 9001 i DIN ISO 13485. Made in Germany.

Ekskluzivno zastupstvo i distributer: ANTISEPTICA d.o.o. Magdalenićeva 1, 10410 Velika Gorica
T +385 1 6214 790 F +385 1 6226 952 E info@antiseptica.hr | www.antiseptica.hr



ANTISEPTICA